

# NovoRapid® FlexTouch®, administración de insulina con una vuelta, un toque y un clic

## vuelta



Hale el capuchón de la pluma hacia afuera.



Desprenda la lengüeta de papel de la aguja y deséchela.



Coloque la aguja a NovoRapid® FlexTouch® de modo que quede derecha y ajustada. El dispositivo NovoRapid® FlexTouch® está diseñado para su uso con las agujas NovoTwist® y NovoFine®.

Hale y saque el capuchón exterior grande de la aguja y guárdelo para después.

Hale y saque el capuchón interior de la aguja y deséchelo.



Para cebar la pluma, gire el selector de dosis hasta llegar a 2 unidades.

## toque



Sostenga NovoRapid® FlexTouch® con la aguja apuntando hacia arriba y dé un golpecito suave en el cartucho.



Toque y mantenga presionado el botón. Debe aparecer una gota de insulina en la punta de la aguja. De no ser así, repita el procedimiento hasta 6 veces. Si no aparece insulina, cambie la aguja y repita una vez más. Si sigue sin aparecer una gota de insulina, la pluma está defectuosa y debe usar una nueva.



Gire el selector de dosis hasta alcanzar el número de unidades que necesite inyectar.




Injecte la dosis tocando y manteniendo presionado el botón hasta que el selector de dosis vuelva a cero.

## clic





Cuando el dial vuelva a cero, un clic de final de dosis indicará que la administración se ha completado.

La aguja debe permanecer debajo de la piel durante al menos 6 segundos después de esta confirmación.

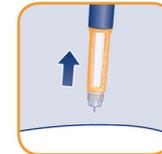

Retire la aguja de la piel.

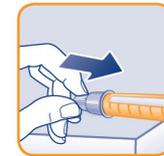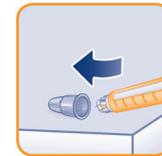

Coloque el capuchón exterior más grande de la aguja sobre una superficie plana y, sin tocarlo ni tocar la aguja, guíe la pluma hacia adentro del capuchón hasta que la aguja quede cubierta.

Luego, empuje el capuchón sobre la pluma hasta que quede fija.

Retire la aguja y deséchela siguiendo las indicaciones de su profesional de atención médica.

Guarde NovoRapid® FlexTouch® sin la aguja y vuelva a tapar la pluma con el capuchón después de cada uso. Guarde NovoRapid® FlexTouch® a temperatura ambiente hasta su siguiente inyección.

NovoRapid® (insulina aspart) está indicado para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus que necesitan insulina para el control de la hiperglucemia. Normalmente, debe usarse en regímenes combinados, con una insulina de acción intermedia o prolongada. NovoRapid® (viales de 10 mL) puede también usarse para la infusión subcutánea continua de insulina (CSII, por sus siglas en inglés) en sistemas de bombeo que tengan licencia en Canadá para la infusión de insulina.

Consulte la Información para el consumidor de NovoRapid® para obtener una lista completa de las contraindicaciones, advertencias y precauciones, reacciones adversas y posología.

Fecha de preparación: abril de 2012. Este documento es una traducción textual de un sistema publicitario y promocional (APS, por sus siglas en inglés) aprobado por el Consejo Asesor de Publicidad Farmacéutica (PAAB, por sus siglas en inglés).



Todas las marcas comerciales son propiedad de Novo Nordisk A/S y son usadas por Novo Nordisk Canada Inc.  
**Novo Nordisk Canada Inc.**, 300-2680 Skymark Avenue, Mississauga, Ontario L4W 5L6.  
 Tel.: (905) 629-4222 o 1-800-465-4334. [www.novonordisk.ca](http://www.novonordisk.ca)

**NovoRapid® FlexTouch®**  
*(insulina aspart)*



NR/0412/00029E